



ARDO Twincare II

Dynamisches Luftlagerungssystem zur Prophylaxe, Therapie und schmerzlindernden Lagerung

Jetzt bis 150 kg
und Dekubitus-
grad 4

ARDO - Entlasten ist leichter als Heilen




Das höchst effiziente dynamische Luftlagerungssystem Twincare II mit sehr niedrigem Auflagedruck und sanftem Druckwechsel

- Prophylaxe bis zu sehr hohem Risiko
- Therapie bis einschliesslich Stadium 4 (40 bis 100 kg)
- Schmerzlindernde Lagerung
- Sehr niedriger Auflagedruck
- Sanfter Druckwechsel
- Einfachste Installation und Bedienung
- Automatische Anpassung des Luftvolumens an das Gewicht des Patienten
- Umschaltbar auf 40-100 kg und auf 101-150 kg Körpergewicht
- Problemlose Reinigung und Desinfektion
- Für den Einsatz in Klinik, Krankenhaus, Pflegeheim sowie für die häusliche Pflege
- HMV Nr. 11.11.04.2039



Funktionsprinzip

Der Patient liegt grossflächig auf der Twincare II Auflage. Dadurch wird das Körpergewicht maximal verteilt und der Auflagedruck vermindert sich auf ein Minimum. Die Anpassung des Luftvolumens an das Gewicht des Patienten erfolgt automatisch. Dieses Luftvolumen wird in einem Verhältnis von 40 % zu 60 % auf die beiden Kammern verteilt und wechselt nach einer Ruhephase von 10 Minuten. Der Druckwechsel ist sehr sanft und deshalb eignet sich das System auch für schmerzempfindliche Patienten.

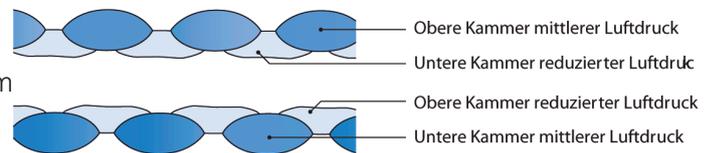

Steuereinheit

Die geräusch- und vibrationsarme Steuereinheit ist mit prozessgesteuerten Drucksensoren ausgerüstet. Sie ist sehr einfach in der Bedienung. Der Ablauf ist visuell dargestellt und die Leuchtanzeigen weisen auf den Betriebszustand hin. Bei Druckabfall oder nicht korrekter Installation setzt ein audiovisueller Alarm ein.

Matratzenauflage (ARDO Twincare II)

Die doppellagige, wabenförmige Twincare II Auflage mit zwei getrennten, gegeneinander versetzten Luftkammern ist aus elastischem, umweltfreundlichem Polyurethan. Sie ist grosszellig, der Patient liegt grossflächig auf. Die Entlüftungsventile/CPR Ventile ermöglichen eine sekundenschnelle Entleerung. Dank Laschen und Befestigungsgurt mit Schnappverschluss kann diese sicher auf der Matratze fixiert werden. Die Reinigung und Desinfektion der entlüfteten Auflage ist problemlos, es gibt keine Schmutzecken.

Bezug

Der hautfreundliche Bezug aus Dartex™ bietet optimalen Schutz und Komfort. Das Material ist elastisch in zwei Richtungen und reduziert Scherkräfte und Reibung. Der Bezug ist wasserundurchlässig aber atmungsaktiv, sowie leicht zu reinigen. Dartex™ ist schwer entflammbar und pilz-, mikrobe- und milbenhemmend.

Bewährte Qualität - Made in Switzerland:

Steuereinheit	36 x 27 x 23 cm
Aufgeblasene Auflage	200 x 90 x 12.5 cm
Systemgewicht	8.5 kg inkl. Verpackung
Spannung/Frequenz	230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz
Nennstrom/Stromverbrauch	100 mA / 20 Watt
Prüfungen/Zertifikate	TÜV Mark Z3, Sicherheit geprüft, Produktion überwacht, ISO 9001/EN ISO 13485, 93/42 EWG, IEC 601

Die zweijährige Garantie auf Steuereinheit und Matratzenauflage unterstreicht die sprichwörtliche Schweizer Qualität.

